

# GENTLE, LESS INVASIVE CERVICAL DILATION



Lamicel

ラミセル 子宮頸管拡張器

Medtronic


# ラミセルは子宮頸管の軟化を促し、滲出液の吸収・膨張により、緩やかに拡張する子宮頸管拡張器です。

## FEATURE

- 繊維を含んでいない、ソフトで丈夫なポリビニールアルコールを素材として使用しており、滲出液を吸収しながら緩やかに膨張します。

## BENEFIT

- 急速拡張法などによる機械的圧力とは違い、緩やかに拡張するため、頸管にかかる負担が少なくすみます。
- 非繊維質なので抜去時に繊維が残りやすく、損傷を抑えつつ簡易に抜去することができます。

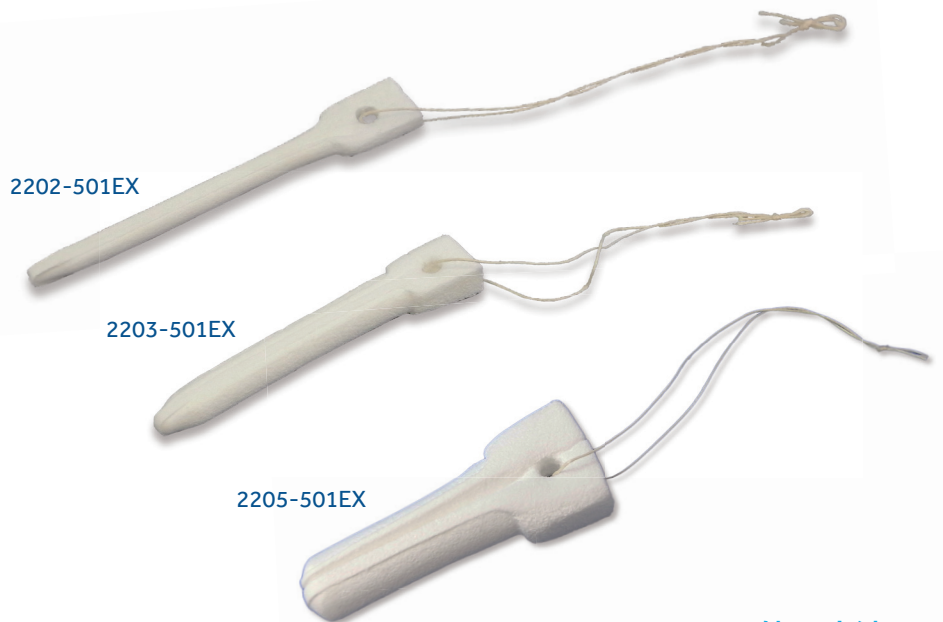

### ■ 包装イメージ



包装および膨張時イメージはすべて2203-501EXです。撮影および印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。また予告なく、パッケージが変更になる場合があります。

### ■ 膨張時イメージ



## 使用方法

1. 子宮頸部を露出するために膣円蓋にスペキュラムを挿入してください。
2. 子宮頸部及び膣円蓋の消毒を行ってください。
3. 鉗子等を用いて本品を挿入してください。
4. 鉗子等を用いて本品をゆっくりと抜去してください。

## Ordering Information

カタログ番号	製品名	入り数
2202-501EX	ラミセル 3mm	20個/箱
2203-501EX	ラミセル 5mm	20個/箱
2205-501EX	ラミセル 10mm	10個/箱

すべてガンマ線滅菌済

# Medtronic

製造販売業者

日本メドトロニック株式会社

サージカルテクノロジー事業部

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

札幌支店 TEL 011-271-0681 FAX 011-271-0680

仙台支店 TEL 022-711-6657 FAX 022-711-1007

東京支店 TEL 03-6774-4604 FAX 03-6774-4775

名古屋支店 TEL 052-220-6446 FAX 052-222-8452

大阪支店 TEL 06-6457-1261 FAX 06-6457-1260

広島支店 TEL 082-245-7958 FAX 082-245-7945

九州支店 TEL 092-473-1616 FAX 092-473-1013

販売名: ラミセル

医療機器届出番号: 13B1X00261X00002

medtronic.co.jp